


Allegato 2

Istruzioni uso DPI/PPE

Nelle procedure diagnostico-assistenziali (visita, medicazione, ecc), le prestazioni sanitarie possono richiedere un contatto fisico con il paziente. In questi casi, non è possibile osservare la distanza di biosicurezza di 1 metro e, quindi, può rendersi necessario l'uso di dispositivi medici o di DPI (dispositivi di protezione individuale), diversi a seconda dei casi.

DISPOSITIVI MEDICI E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI

Mascherina chirurgica monouso

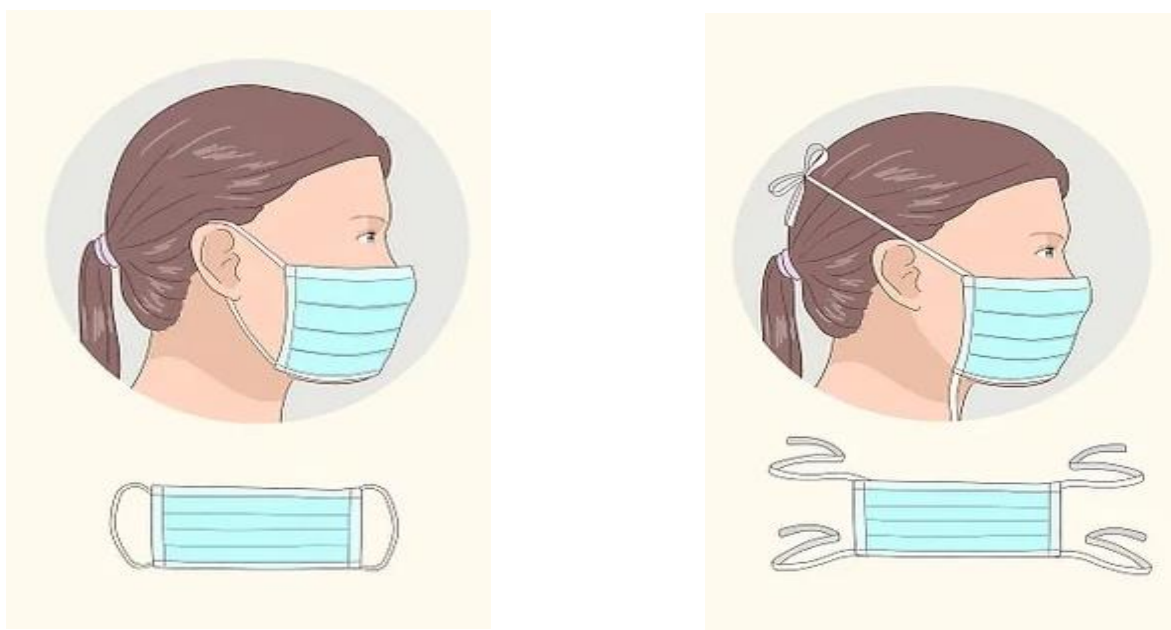

Come indossare la mascherina chirurgica monouso

La mascherina deve essere indossata, seguendo i passaggi di seguito elencati:

1. Prima di indossarla, è necessario lavarsi adeguatamente le mani con acqua e sapone o con una soluzione alcolica
2. La mascherina indossata deve coprire bocca e naso; ciò si ottiene, assicurandosi che aderisca bene al volto
3. Evitare di toccare con le mani la mascherina una volta indossata e, in caso di contatto accidentale con le mani, togliere la mascherina e sostituirla
4. Quando si inumidisce, sostituirla con una nuova, senza riutilizzarla.

Come togliere la mascherina chirurgica monouso

La mascherina deve essere tolta, seguendo i passaggi di seguito elencati:

1. Prendere la mascherina dall'elastico/laccetto, senza toccarne la parte anteriore
2. Gettare la mascherina immediatamente in un sacchetto da chiudere
3. Eseguire l'igiene delle mani con gel alcolico o con acqua e sapone.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE FACCIALI FILTRANTI (FFP2 o FFP3)

Il facciale filtrante FFP2 o FFP3 è indicato nel caso di assistenza diretta a una persona con sospetta infezione da nuovo Coronavirus (presenza di sintomi respiratori quali febbre, tosse, starnuti, fatica a respirare); quindi, l'uso è riservato esclusivamente al personale sanitario.

Per le modalità di posizionamento, è necessario seguire la sequenza di utilizzo di seguito indicata.



SEQUENZA PER INDOSSARE I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

1. Togliere ogni monile e/o oggetto personale.
2. Praticare l'igiene delle mani con acqua e sapone o soluzione alcolica.
3. Indossare il primo paio di guanti non sterili
4. Indossare il camice monouso
5. Indossare il dispositivo FFP2. (N.B.: non utilizzare in presenza di barba o basette lunghe, che non permettono il contatto diretto tra il volto e i bordi di tenuta del respiratore. È necessario radersi la barba tutte le mattine). Il dispositivo va indossato, coprendo naso, bocca e mento e stringendo la parte flessibile sopra il naso; infine, va assicurato con gli elastici/lacci dietro il capo
6. Indossare il secondo paio di guanti monouso, in modo da coprire completamente i polsi del camice monouso
7. Eseguire la prova di tenuta: coprire con le due mani il respiratore, evitando di muoverlo dalla propria posizione: durante la inspirazione, la mascherina deve collassare, nell'espiazione vanno controllate eventuali perdite dai bordi. In caso di perdite dai bordi della mascherina, riposizionare il facciale fino a ottenere una perfetta tenuta sul volto.

PROCEDURA DI RIMOZIONE DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Si tratta di un'attività da svolgere, appena usciti dalla stanza dedicata e prima di accedere negli altri locali, in quanto i DPI monouso vanno smaltiti nell'apposito contenitore.

1. Sfilare il camice monouso e contestualmente sfilare il paio di guanti esterno; (N.B.: il camice va sfilato con indosso i guanti interni, toccando soltanto la parte interna del camice stesso);
2. I guanti vanno sfilati, rivoltandoli; con la mano destra sfilare il primo guanto sinistro; quindi, con la mano sinistra sfilare il primo guanto destro o viceversa;
3. Smaltire guanti e camice mono-uso nell'apposito contenitore per rifiuti sanitari a rischio infettivo;
4. Togliere l'FFP2, prendendo il dispositivo dall'elastico e smaltirlo nell'apposito contenitore per rifiuti sanitari a rischio infettivo. Non toccare mai il dispositivo nella parte anteriore esposta al pubblico;
5. Sfilare il secondo paio di guanti rivoltandoli; con la mano destra sfilare il primo guanto sinistro; quindi, con la mano sinistra sfilare il primo guanto destro o viceversa;
6. Smaltire i guanti nell'apposito contenitore per rifiuti sanitari a rischio infettivo;
7. Eseguire l'igiene delle mani con gel alcolico o con acqua e sapone.

GESTIONE DEI MATERIALI E RIFIUTI

I rifiuti rappresentati da mascherine, guanti, DPI come le maschere FFP2/FFP3, unitamente ai materiali potenzialmente contaminati come fazzoletti, garze, carta, ecc., devono essere trattati ed eliminati come materiale infetto di categoria B (UNI3291). Allo scopo, i suddetti materiali devono essere inseriti in appositi sacchi, che vengono immediatamente chiusi, per essere conferiti nel contenitore dei rifiuti ospedalieri.

La procedura di corretta vestizione e rimozione dei dispositivi medici e dei dispositivi di protezione individuale sopra illustrati, è visionabile al seguente link:

<https://www.youtube.com/watch?v=N2vjIulykho>